



Liv Des +72

Produktinformation

Flytande desinfektionsmedel med rengörande verkan (tensid). Avsedd att användas för desinfektion av släta ytor på icke-invasiva medicintekniska produkter. Produkten kan även användas på allmänna släta ytor som tål alkohol.

Endast för professionell användning, av hälsovårdspersonal (medicinskt ändamål) och professionella lokavårdare (icke-medicinskt ändamål).

Aktiv substans: etanol 606 g/kg, isopropanol 61 g/kg.
Innehåller ca 75 vol% etanol med en tillsats av tensid.

Bruksanvisning

För icke-invasiva medicintekniska produkter, följ alltid tillverkarens bruksanvisning.

Applicera rikligt med desinfektionsmedel direkt på ytan. Bearbeta ytan med ren torkduk/luddfritt papper. Låt ytan vara fuktig hela verkningstiden, därefter lufttorka.

Produktdata

Artikelnummer	Benämning	Antal/kartong	EAN
17339300	Liv Des +72 300 ml	24 * 300ml	7391443173301
17330001	Liv Des +72 1L	12 * 1L	7391443173332
1733M001	Liv Des +72 1L Membrankapsyl	12 * 1L	7391443173387
17330005	Liv Des +72 5L	2 * 5L	7391443173356

UNSPSC: 42281604





CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa, NB 3033.

Mikrobiologisk effekt:

Verkningstid:

Bactericidal	EN13727:		5min
Bactericidal	EN13697:		2min
Bactericidal	EN16615:		5min
Yeasticidal	EN13624:		5min
Yeasticidal	EN13697:		2min
Yeasticidal	EN16615:		5min
Fungicidal	EN13624:		5min
Virucidal	EN14476		
	Höljeförsedda virus:		1 min
	Murine Norovirus:		5min
	Adenovirus:		5min

Användarsäkerhet

Använd Liv Des +72 på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

För ytterligare teknisk specifikation, se säkerhetsdatablad.

- Allvarliga incidenter med Liv Des +72 ska anmälas till info@clemondo.se samt till Läkemedelsverket.
- Produkten ska inte användas på ytor eller utrustning som är känsliga för produkten, t.ex. material som kan korroderas eller skadas av alkohol.
- Personer med allergier eller känslighet mot vissa kemikalier i desinfektionsmedel kan få hudutslag, andningsproblem eller andra allergiska reaktioner. Använd skyddsutrustning vid behov.
- Kan vara mindre effektiv i närvaro av organiskt material som smuts och kroppsvätskor. Förbehandling med rengöring kan vara nödvändig.

Förpackningsmaterial

Förpackning 300ml, 1L, 5L	Flaska/Dunk - HDPE
Förslutning 300ml, 1L, 1L membran	Kapsyl - PP
Förslutning 5L	Kapsyl - PP, PE
Etikett	Etikett - PE
Transportförpackning	Kartong - Wellpapp

Hantering

Förvaras i rumstemperatur i försluten originalförpackning och oåtkomligt för barn. 3 års hållbarhet i öppnad förpackning, 12 månader efter öppnande.

Produkten innehåller brandfarliga ämnen. Förvara och använd produkten långt ifrån värmekällor, gnistor, öppen eld eller heta ytor.

Tomma emballage ska sorteras som "förpackning av plast". Ej helt tomma emballage ska sorteras som "farligt avfall".





Information/Symbol Description (to be included in IFU)	Symbol	Guidance for use (additional text required/explanations)
Manufacturer (Legal Manufacturer) <i>Shall include physical address</i>		Clemondo AB Makadamgatan 16 254 64 Helsingborg Tel: 042-25 67 00 www.clemondo.se info@clemondo.se
CE mark in accordance with 2017/745 Medical Device Regulations		Yes, no NB number
Medical device		N/A
Catalogue number (=Product/Model number used to identify product to purchasers)		N/A
Product name	N/A	N/A
Intended purpose	N/A	
LOT		N/A
Unique Device Identifier		N/A
Consult instructions for use		N/A
Expiry date		N/A
Warnings/precautions		
	 Fara	Mycket brandfarlig vätska och ånga
	 Fara	Behållaren ska vara väl tillsluten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning. Håll utom räckhåll för barn.