

Avsedd användning

CPR**AIDR**® är utformad för att användas av lekmän som har genomgått utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) samt bekantat sig med produkten. Syftet är att förbättra kvaliteten på HLR som utförs av lekmän.

Vid användning i en verklig situation på en person som drabbats av ett hjärtstopp hjälper CPR**AIDR**® användaren att utföra HLR enligt gällande medicinska riktlinjer. Detta genom ljudsignaler som hjälper till att hålla rätt takt under HLR, samt att enhetens display ger feedback för att underlätta för användarna att åstadkomma korrekt kompressionsdjup och fullständigt kompressionsavslut.

CPR**AIDR**® är endast avsedd att användas på personer som är 18 år eller äldre.

Viktig information

Varningar

Använd inte CPR**AIDR**® på en person som andas normalt.


Använd inte CPR**AIDR**® på personer under 18 år.

Använd inte produkten om den drabbade ligger på ett mjukt underlag, som i en säng eller soffa. Försök alltid att få den drabbade på ett hårt underlag.

Använd inte produkten i rörliga miljöer, som en båt, helikopter eller bil, eftersom återkopplingen kan bli felaktig.

Om produkten verkar skadad, saknar fungerande batterier, eller om det av någon annan anledning innebär att HLR fördröjs, ska produkten inte användas.

Enhetsen är inte designad för att doppas i vatten eller hållas under rinnande vatten.

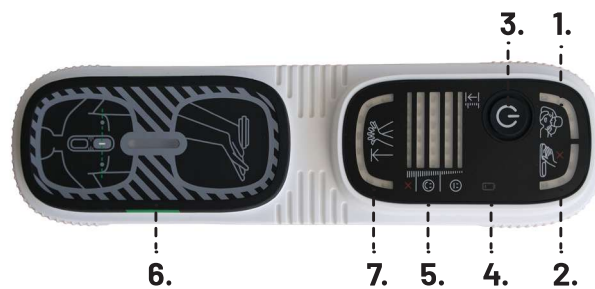

Produktbeskrivning

Obs! Vissa mindre avvikelser kan förekomma

1. Påminnelse om inblåsningar: Ikonen tänds och enheten talar om för dig att genomföra inblåsningar.

2. Lampan tänds för att varna användaren när uppsläpp inte är högt nog.

3. Strömknapp: Knapp för att slå på och av enheten.

4. Batteriindikator: Lyser upp när batterierna behöver bytas ut.

5. Feedback på kompressionsdjup:

- Vitt: För grunt
- Grönt: Bra
- Rött: För djupt

6. Tryckplatta: Område där du placerar dina händer för att utföra kompressioner.

7. Metronom: Blinkar i den takt som kompressioner ska utföras.

CPR AIDR® är en medicinteknisk produkt som tillverkas av VitalSigns Innovation AB.

Denna användarinstruktion gäller för CPR**AIDR**® med modellnummer CA-LM-1719. Instruktionerna kan komma att uppdateras, för senaste utgåva gå till www.vitalsigns.se/eifu

Viktigt

Vänta inte med HLR. Om det uppstår problem med produkten, fortsätt att ge HLR utan den.

Observera

Kontrollera batteristatusen regelbundet för att säkerställa att enheten fungerar vid en nödsituation.

Använd endast batterier av den typ som medföljer produkten (AAA Litium).

Avlägsna produkten från personer i samband med defibrillering. Detta som en säkerhetsåtgärd för att säkerställa defibrillatorns funktion.

Kom igång och använd produkten

Anslut batterier:

Sätt i batterierna (AAA Litiumbatterier) enligt instruktionerna. Kontrollera att enheten startar.

Ladda ner CPR**AIDR**® -appen: Finns på Google Play eller App Store.

Följ vår kom-igång-guide i appen eller bruksanvisningen för att lära dig mer om produkten.

Träna: Aktivera enheten genom att trycka på strömknappen (Power-knappen). Använd Compression Pad om den valts till, annars använd en träningsdocka eller i sista hand en soffkudde. Följ tekniktipsen i vår App noggrant och sträva efter hög kvalitet på din teknik.

Bekanta dig med "Kedjan som räddar liv":

Läs igenom HLR-rådets medskickade träningsprogram för att förstå rätt

agerande och ordningen vid ett hjärtstopp.

Träna regelbundet i minst 10 minuter per kvartal.

Batteriövervakning

Kontrollera batteristatus: Håll ett öga på batteriindikatorn på enheten. Om indikatorn tänds, betyder det att batterierna är svaga och behöver bytas ut.

Byta batterier:

När batteriindikatorn tänds, stäng av enheten och byt ut de gamla batterierna mot nya. Använd endast batterier av den typ som rekommenderas för produkten (AAA Litiumbatterier).

Följ instruktionerna för korrekt installation av batterierna, se till att de är ordentligt isatta och att enheten fungerar som den ska efter bytet.

Varning! Avbryt aldrig HLR för att byta enhetens batterier.

Kontakta VitalSigns Innovation:

Om du är osäker på vilken typ av batterier du behöver, eller om du har andra frågor om batteribyte, kontakta VitalSigns Innovation för att få korrekt information och support. Vi kan ge dig detaljer om var du kan köpa rätt batterier samt ge ytterligare hjälp vid behov.

Regelbunden kontroll:

För att säkerställa att enheten är redo för användning vid behov, kontrollera batteristatus regelbundet, även innan planerade träningspass eller vid rutinkontroller.

Förvaring och underhåll

Förvaring:

Stäng av enheten och förvara den inomhus: Se till att enheten förvaras i en temperatur som överstiger 10°C.

Undvik direkt solljus: Place- ra enheten bort från direkt solljus, eftersom det kan påverka produktens åldrande

och prestanda över tid.

Underhåll:

Batteribyte: Byt batterierna regelbundet, åtminstone en gång vartannat år, eller tidigare om batteriindikatorn visar låg batterinivå.

Rengöring:

Rengör CPRAIDR® var sjätte månad för att förhindra att damm tränger in i produkten. Använd en fuktig trasa och se till att enheten är avstängd och torr innan den sätts tillbaka i bruk.

Ytterligare tips:

Kontrollera regelbundet: Genomför en visuell inspektion av enheten och dess batterier regelbundet för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Förvara i skyddad miljö: För att undvika skador och bevara enhetens funktionalitet, förvara den i en ren och torr miljö, borta från extrema

temperaturer och fukt.

Rengöring i samband med användning**Efter användning i en skarp situation:**

Byt ut produkten: Efter användning i en akut situation erbjuder VitalSigns möjlighet att byta in produkten mot en ny med 50% rabatt från det aktuella ordinarie priset. Kontakta VitalSigns för instruktioner om gällande rutiner.

Om du istället väljer att rengöra produkten, följ dessa riktlinjer:**Rengöring efter användning i träningssyfte:**

Torka av enheten med en fuktig trasa för att avlägsna ytliga smutsrester.

Använd en desinfektions-servett för att säkerställa att enheten är ren och fri från mikroorganismer.

Desinficering och rengöring efter användning i en skarp situation:

Förvara enheten i en säker miljö, t.ex. i en plastpåse, tills den kan rengöras.

Ta bort synlig smuts med en engångstrasa eller papper.

Rengör enheten först med en fuktig trasa för att avlägsna rester av smuts. Använd därefter en desinfektionsservett för att desinficera ytan.

Applicera en måttlig mängd isopropanol (70%) och låt det verka i 10 minuter för att säkerställa en grundlig desinfektion.

Torka av enheten med en fuktig trasa och låt den torka helt.

Kontrollera att enheten fungerar som den ska efter rengöring.

Avfallshantering

Denna produkt är märkt i enlighet med Europeiska unionens direktiv 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). För att bidra till att skydda miljön och människors hälsa, se till att produkten kasseras på rätt sätt.

Symbolen på produkten:

Visar att produkten inte får slängas som hushållsavfall. Den ska istället lämnas till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

För ytterligare information om hantering, insamling och återvinning av denna produkt, kontakta din kommun, sophämningsföretaget, återvinningscentralen eller det VitalSigns-ombud där du köpte produkten.

Regelverk

Denna produkt uppfyller

kraven i Medicinsktekniska förordningen (MDR), förordning (EU) 2017/745.

Garanti, service och kontakt

Informationen avser CPRAIDR®, modell CALM-1719.

Garanti

Utöver dina lagstadgade rättigheter enligt Konsumentköplagen (2022:260) erbjuder vi en ettårig begränsad garanti på denna CPRAIDR®, från inköpsdatumet. Garantin täcker tillverkningsfel som annars inte täcks av Konsumentköplagen. De garantivillkor som gäller vid tidpunkten för ditt köp ingår med denna produkt och finns tillgängliga på www.vitalsigns.se/garanti. Vänligen behåll ditt inköpsbevis för eventuella garantianspråk. Denna garanti begränsar inte dina lagstadgade rättigheter.

Service:

Vid behov av service, eller reklamation, besök: www.vitalsigns.se/service, eller kontakta VitalSigns Innovation AB.

Kontakt:

CPRAIDR® tillverkas av VitalSigns Innovation AB.


Adress:

VitalSigns Innovation AB
Kräfteriket 9A, 114 19 Stockholm

E-Post: info@vitalsigns.se

Telefon: 0709540777

Teckenförklaring

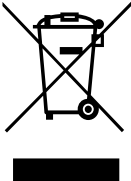	Tillverkare och tillverkningsdatum		Se bruksanvisning
	Produktnamn		Medicinteknisk produkt
	Artikelnummer		Unik identifikator
	Tillverkningsserie		CE-märkning
	Utgångsdatum		Produkten ska återvinnas enligt EU-direktiv för elektroniskt avfall och inte slängas som hushållsavfall (WEEE).