



Kiilto Pro Ytdesinfektion Plus

Ytdesinfektion



Kiilto Pro Ytdesinfektion Plus består av ca 45 vol% isopropylalkohol samt tensid (smutslösande) och är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbriter, bänkar och bord. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda virus som t.ex. Corona, Hepatit b & C samt HIV. Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår på den behandlade ytan.

Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN13697 (baktericidal/jästicid effekt) 1 min

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek

EN16615 (baktericidal/jästicidal effekt) 1 min

EN14476 (Vacciniavirus/höljeförsedda virus) 30 sek, (Adenovirus 5 min)

EN14348 (mycobactericidal effekt) 1 min (clean), 5 min (dirty)

Desinfektionsmedel BPR-reg. nr. 5654-1-3. Verksamma ämnen och biocidprodukt är godkända enligt biocidförordningen (Förordning (EU) nr 528/2012).

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Användningsområde	Lämplig för ytdesinfektion inom hälso- och sjukvården, tandvården eller djursjukvården. Även lämplig för privat bruk.	
Produktegenskaper	Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas God upplösande effekt på t.ex. spill av blod	
Bruksanvisning	Används på ytor som tål alkohol. Tillsatsen av tensid gör att ytan inte behöver rengöras först. Innehåller inte castor oil. Gör så här: 1. Spruta rikligt på ytan alternativt dränk in en torkduk med utspädd vätska. 2. Bearbeta ytan upprepade gånger under minst 30 sek (se etiketten för kontakttider) 3. Lämna ytan att lufttorka	
Sammansättning	Aktiva ämen	Effekt
	Isopropanol	45vol% Med tensid
pH koncentrat	8.5 svagt alkaliskt	

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion även i öppen flaska förutsatt att produkten förvaras enligt anvisningar. Utgångsdatum står tryckt på flaskan.

Tillverkningsland

SVERIGE

Användar- och miljösäkerhet

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Förpackningsmaterial

Flaska: HDPE plast
Förslutning: PP plast
Transportförp.: FSC-märkt kartong/pappersförpackning

**Förpackningsvolym /
Artikelnr.**

Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
12 x 1 l	468-12	7331964004685	7331964904688
3 x 5 l	469-3	7331964004692	7331964904695
24 x 300 ml	461-24	7331964004616	7331964904619

**Ytterligare information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.