



# DAX



## DAX Ytdesinfektion 75



DAX Ytdesinfektion 75 är avsedd för desinfektion av synligt rena ytor t.ex. bänkar, bord och undersökningsbritsar. DAX Ytdesinfektion 75 är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som HIV, Hepatit B och C.



### Fördelar med DAX Ytdesinfektion 75



- 75 volymprocent alkoholstyrka, med etanol som huvudkomponent
- Verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan
- Har dokumenterad effekt på bakterier, svampar och flera olika virus som t.ex. HIV, Murine Norovirus och Adenovirus.
- Flaskan har en triggerpump som ger en jämn spraydos utan aerosolbildning
- Triggerpumpen underlättar applikationen och gör det lättare att komma åt på mindre skrymslen



### Gör så här/Dosering:

- Spruta rikligt på den rengjorda ytan alternativt dränk in en torkduk med utspädd vätska
- Bearbeta ytan upprepade gånger under minst 30 sek (se nästa sida för kontakttider)
- Lämna ytan att lufttorka



Produktnamn	Artikelnummer	EAN	Antal st/krt
DAX Ytdesinfektion 75, 500 ml spray	492-15	7331964004920	15

# DAX Ytdesinfektion 75

## Mikrobiologisk information

### Bactericidal effekt

EN 13727 Pseudomonas aeruginosa 30 sek  
Staphylococcus aureus 30 sek  
Enterococcus hirae 30 sek  
Escherichia coli 30 sek

EN 13697 Pseudomonas aeruginosa 5 min  
Staphylococcus aureus 5 min  
Enterococcus hirae 5 min  
Escherichia coli 5 min

### Yeasticidal effekt

EN 13624 Candida albicans 30 sek

EN 13697 Candida albicans 1 min

### Fungicidal effekt

EN 13624 A. Brasiliensis 15 min

EN 13697 A. Brasiliensis 5 min

### Virucidal effekt

EN 14476 Adenovirus 30 sek  
Murine Norovirus 30 sek  
Limited Virucidal Efficacy

### Mycobactericidal effekt

EN 14348 Terrae 1 min  
Avium 1 min

## Typ av formulering

- Vätska

## Förpackningsmaterial

- Högdensitetspolyeten (HDPE)

## Hållbarhet:

Till utgångsdatum (tryckt på förpackningen)

Produktnamn	Artikelnummer	EAN	Antal st/krt
DAX Ytdesinfektion 75, 500 ml spray	492-15	7331964004920	15