



# Easydes rengörande ytdeinfektionsservett Desinfektionsservett



Användningsklar och snabbverkande desinfektionsservett med god mikrobicid effekt för medicinsk utrustning och ytor som är kritiska med tanke på bekämpning av infektioner. För material som tål alkoholer.

**Användningsområde** För hälsovårdens undersökningsinstrument och -utrustning samt för desinfektion av små ytor. Lämpar sig för de vanligaste materialen, även de flesta plasterna. T.ex. stetoskop, fjärrkontroller, handtag, tangentbord, reglage och beröringsytor. Utmärkt även inom hemsjukvården.

För professionell användning.

**Produktegenskaper** Små förpackningen innehåller 16, större 30 dukar. Mikrobiciden är det etanolbaserade Easydes tvättande ytdeinfektionsmedel som är en snabbverkande desinfektionsmedelsblandning som har ett brett spektrum av mikrobicid effekt och som tål organisk belastning. Easydes dödar effektivt bakterier, virus och svampar. Desinfektionseffekten uppnås även på synligt kontaminerade ytor. Dukens material är luddfritt. Den återförslutningsbara förpackningen är hygienisk att använda.

Produktens mikrobicida effekt har testats: EN 16615 med duken (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, *C. albicans*). Med Easydes vätska: EN 13727 (bakterier), EN 13697 (bakterier, jästen och mögel), EN 13624 (jästen), EN 14348 (tuberkulos och mykobakterier), EN 14476 (adeno- och norovirus), EN 14561 (bakterier), EN 14562 (jästen och mögel), EN 14563 (mykobakterier och tuberkulos).

**Bruksanvisning** Torka noggrant apparaten/ytan som ska desinficeras. Se till att hela ytan som ska desinficeras blir fuktig. Vänta tills alkoholen har avdunstat från ytan innan apparaten börjar användas. Ytorna behöver vanligtvis inte förtvättas eller sköljas. Om ytan som ska desinficeras måste vara absolut fri från rester kan den efter desinfektionen sköljas eller torkas av med gasbinda som fuktats med vatten. Desinfektionen har utförts när den avtorkade ytan är torr.

**Obs** Anteckna ibruktagningsdatumet på förpackningen. Förslut förpackningen efter varje användning.

Använd en öppnad förpackning av 16 styck inom 7 dygn. 30 styck förpackning ska användas inom 3 månader.

Följ apparattillverkarnas anvisningar om rengöring och desinfektion.

Vid *Clostridium difficile*-epidemier rekommenderar vi som desinfektionsmedel Klorilli eller Erisan Oxy+, eftersom alkoholbaserade produkter inte dödar bakteriesporer.

Sammansättning	Aktiva ämen	Effekt		
	Etanol	60 p-% biocid		
	Tertiär butanol	< 2 % denatureringsmedel		
	Kvaternär ammoniumklorid	< 0,5 % Biocid, rengöringseffekt		
	Alkylamin	< 0,5 % biocid		
<b>Övriga ingredienser</b>	Dukmaterial 60 % polyester, 40 % viskos.  8285: dukstorlek 120 x 135 mm (16 engångsdukar). 8286: dukstorlek 285 x 200 mm (30 engångsdukar).			
<b>pH koncentrat</b>	10.0 svagt alkaliskt			
<b>Förvaring</b>	I rumstemperatur.  8285: 1,5 år från tillverkning. 8286: 2 år från tillverkning.			
<b>Tillverkningsland</b>	FINLAND			
<b>Användar- och miljösäkerhet</b>	Allvarliga tillbud orsakade av Easydes ytdesinfektionsservett ska rapporteras till asiakaspalvelu@kiilto.com och lokal myndighet för medicintekniska produkter (Fimea i Finland, Läke medelsverket och/eller IVO i Sverige).  Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.			
<b>Förpackningsvolym / Artikelnr.</b>	<b>Transport krt.</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>GTIN</b>	<b>GTIN (krt)</b>
	16 x 16 st	8285	6417964082852	6417964480818
	18 x 30 st	8286	6417964082869	6417964485967
<b>Ytterligare information</b>	Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida <a href="http://www.kiiltoclean.com/se">www.kiiltoclean.com/se</a> eller genom att kontakta vår kundtjänst på <a href="mailto:info.kiiltoclean.se@kiilto.com">info.kiiltoclean.se@kiilto.com</a>			