



## Liv Liv Des +72 Wipes

### Produktinformation

DES+72 Wipes är tänkt att användas inom vård och omsorg för rengöring och desinfektion av mindre ytor. Enkelt att ha med sig vid hembesök, i ambulans, taxi, färdtjänstbil mm.

Även för rengöring av sängar och ytor motsvarande ca 1m<sup>2</sup>

Innehåller 150 singelförpackade nonwoven ytdesinfektionsservetter.

Servetten innehåller 10 ml ytdesinfektionsvätska med tensid (rengöring). Hållbar och smidig desinfektionsservett för diverse sprittåliga ytor. Duken är 185\*215 mm och är tillverkad av polyester/viskos.

### Bruksanvisning

Öppnas lätt genom att riva upp förpackningen i hörnan. Bearbeta ytan noggrant. Låt ytan därefter självtorka. Ytan ska vara fuktig minst 1 min för att uppnå full bakteriologisk effekt. 5 min för full virucidal effekt.

### Produktdata

| Artikelnummer | Benämning                  | Antal/kartong | EAN           |
|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 17230150      | Liv Des +72 Wipes 150-Pack | 150st/kartong | 7391443172397 |
| UNSPSC:       | 42281604                   |               |               |





### Verkningstid/virkningstid/vaikutusaika

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Bactericidal EN13727: ..... | 5min |
| Bactericidal EN13697: ..... | 2min |
| Bactericidal EN16615: ..... | 5min |
| Yeasticidal EN13624: .....  | 5min |
| Yeasticidal EN13697: .....  | 2min |
| Yeasticidal EN16615: .....  | 5min |
| Fungicidal EN13624: .....   | 5min |
| Virucidal EN14476           |      |
| Höljeförsedda virus: .....  | 1min |
| Murine Norovirus: .....     | 5min |

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

### Förpackningsmaterial

Servett

Fiberduk (Nonwoven PES), Viskos

Primärförpackning

Folie - Papper, Polyeten (PE)

Aluminium, Surlyn

Sekundärförpackning

Kartong - Wellpapp

Transportförpackning

Kartong - Wellpapp

### Hantering

Lagras i normal rumstemperatur. Hållbarhet i oöppnad förpackning är 3 år. Öppnad förpackning ska användas omgående. Ytterförpackning sorteras som förpackning av papper. Innerförpackningen sorteras som restavfall.

