



# Suma Med Super LpH

## Maskindiskmedel för disk- och spoldesinfektorer

### Produktbeskrivning

Suma Med Super LpH är en koncentrerad specialprodukt för disk- och spoldesinfektorer. Produktens unika sammansättning gör produkten lågalkalisk samtidigt som den effektivt löser smutsen i mjuka och medelhårda vatten.

### Produktegenskaper

Suma Med Super LpH är ett lågalkaliskt maskindiskmedel anpassat för disk- och spoldesinfektorer. Produkten är speciellt formulerad för instrumentdisk, rondskålar, anesthesiutrustning och bidéskålar. Kan även användas till kärlkokare och maskindisk. Produkten passar i mjuka och medelhårda vatten.

### Produktfördelar


- Löser effektivt smuts och intorkat blod
- Koncentrerad produkt ger låg användarkostnad
- Motverkar kalkbildning i diskmaskinen

### Bruksanvisning

Suma Med Super LpH doseras normalt med automatisk doseringsutrustning 1 - 3 ml/l. Koppla dunken till doseringsautomatiken/doseringsslangen som sedan automatiskt doserar rätt mängd.

Lokala förhållanden avgör den exakta doseringsmängden.

CE

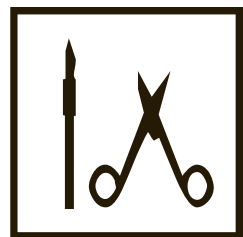

° A.I.S.E.

*\*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.*



# Suma Med Super LpH

## Teknisk information

Utseende: Klar färglös vätska

pH (1% lösning vid 20°C): 11.4

Relativ densitet (20°C): 1.15

*Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.*

## Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, [sds.diverseym.com](https://sds.diverseym.com).

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

## Att beakta

Om produkten används enligt bruksanvisning kan Suma Med Super LpH användas på dom flesta vanligen förekommande material inom sjukvården. Använd ej på material som är känsliga för alkali.

## Tillgängliga förpackningsstorlekar

2x5 L Dunk

20 L Dunk

200 L Fat